

Stiltz™

The **home lift** company

Stiltz Trio Gebruikershandleiding

2015.10.26
v.0



INHOUD

HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE	3
HOOFDSTUK 2 ZORG VOOR VEILIGE WERKING	3
HOOFDSTUK 3 STILTZ TRIO CHECKLIST BIJ LEVERING	4
HOOFDSTUK 4 BESCHRIJVING	5
HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE SPECIFICATIES	6
HOOFDSTUK 6 AFMETINGEN	7
HOOFDSTUK 7 BEDIENING	8
7.1. Bediening van de COP-besturing	8
7.2. Bediening van het verdiepingsstation	9
HOOFDSTUK 8 VEILIGHEIDSVORZIENINGEN	10
8.1. Beschermingsschot en vloerplugsensoren	10
8.2. Deurslot en deur-open- sensor.....	10
8.3. Extra veiligheidssensoren	11
8.4. Noodfuncties	11
8.5. Noodrem	11
8.6. Systeem accuverlaging	11
HOOFDSTUK 9 PROBLEMEN OPLOSSEN	12
HOOFDSTUK 10 GARANTIE.....	15

HOOFDSTUK 1 INTRODUCTIE

Dank u voor de aankoop van een Stiltz Trio thuislift; we zijn ervan overtuigd dat hij het leven van de eindgebruiker comfortabeler, veiliger en gemakkelijker zal maken. De Stiltz Trio is eenvoudig te bedienen en te onderhouden. Deze handleiding wijst u op de functies en hoe u uw Stiltz Trio moet gebruiken.

De Stiltz Trio thuislift is een apparaat dat bestaat uit een liftkooi (platform) voor drie staande personen of één zittende persoon voor verticale verplaatsing langs twee geleiderails (dragers). De Trio verplaatst zich tussen aangewezen verdiepingen door een opening in het huis. De Trio kan gebruikt worden voor een aantal verdiepingen (tot 4 m of 157 $\frac{1}{2}$ "") met een enkele toegang tot de liftkooi of via een liftkooi met een toegangsconfiguratie op bijv. een tussenverdieping. De Trio is een niet-automatische thuislift, wat betekent dat de gebruiker constant druk moet toepassen om de lift te besturen.

De Stiltz Trio thuislift voldoet aan de Australische norm AS1735.15, de machinerichtlijn 2006/42/EC, de Europese norm EN 81-41:2010, en de American Society of Mechanical Engineers ASME 17.1.

Voor zaken die niet in deze handleiding worden beschreven, kunt u contact opnemen met uw erkende Stiltz dealer of direct met Stiltz. Onze contactinformatie staat vermeld aan het einde van deze handleiding.

HOOFDSTUK 2 ZORG VOOR VEILIGE WERKING

De Stiltz Trio is uitgerust met veiligheids- en noodfuncties die verder gaan dan voorgeschreven. Om een veilige werking van de lift te garanderen, moet deze worden bediend in overeenstemming met de handleiding om ongelukken te voorkomen.

- Lees deze handleiding zorgvuldig voordat u de Stiltz Trio thuislift gebruikt.
- Om ongelukken te voorkomen, moet u zich houden aan de instructies en te allen tijde uit de buurt van bewegende onderdelen blijven.
- De lift is een vervoermiddel. Alleen mensen die weten hoe die werkt, begrijpen dat ze verantwoordelijk zijn voor het veilig opstarten, voortbewegen en stilzetten en zich bewust zijn van mogelijke gevaren, mogen deze bedienen.
- De lift is geen speelgoed. Kinderen mogen niet met, op of in de lift spelen. Kinderen mogen alleen de lift bedienen onder toezicht van een volwassene en deze gebruiken voor het doel waarvoor hij is ontworpen.
- Zorg dat alleen Stiltz of een erkende Stiltz dealer de Stiltz Trio thuislift installeert en onderhoudt. Onder geen beding mag iemand anders dan een gecertificeerde dealer en met toestemming van Stiltz, een mechanisch of elektrisch apparaat op deze lift installeren, aanpassen, onderhouden of wijzigen. Het niet opvolgen van deze waarschuwing kan leiden tot het niet goed werken of belemmeren van het veiligheidssysteem; dit kan leiden tot ernstige verwondingen of de dood. Stiltz aanvaardt in dit geval geen aansprakelijkheid voor schade aan eigendommen, garantieclaims of persoonlijk letsel, inclusief de dood.
- Passagiersveiligheid is het resultaat van talloze details in het ontwerp, de fabricage en de installatie van de apparatuur. Na installatie is voor een betrouwbare en continue veilige werking regelmatig onderhoud en controle nodig, minstens een keer per jaar of vaker indien milieu- of lokale jurisdictie dit vereist.
- Als eigenaar bent u verantwoordelijk voor regelmatig onderhoud en inspectie.
- Raadpleeg deze handleiding voor specificaties, gebruiksaanwijzing en onderhoud van de Stiltz Trio thuislift.
- Na voltooiing van de installatie, moet de dealer of installateur de Stiltz Trio leveringschecklist controleren.

STILTZ TRIO CHECKLIST BIJ LEVERING

Datum: | / / |
 Naam: | |
 Adres: | |
 Telefoon: | |




Serienummer | | Levering uitgevoerd met | |

Uitleg van de Stilt Trio thuislift	Voltooid (afvinken)
<u>Entree van de lift:</u>	
Optische beveiliging	<input type="checkbox"/>
Deur Hek	<input type="checkbox"/>
<u>Liftbesturing:</u>	
Hoofdschakelaar	<input type="checkbox"/>
Stopknop	<input type="checkbox"/>
Sleutelschakelaar	<input type="checkbox"/>
Bedieningsknoppen	<input type="checkbox"/>
<u>Gebruik van de lift:</u>	
Staan Zitten	<input type="checkbox"/>
Goederen vervoeren	<input type="checkbox"/>
Lichten	<input type="checkbox"/>
<u>Lift oproepen wegsturen:</u>	
Afstandsbedieningen	<input type="checkbox"/>
<u>Veiligheidsschakelaars lift:</u>	
Veiligheidspan	<input type="checkbox"/>
Lichtbarrière	<input type="checkbox"/>
Schachtdeksel	<input type="checkbox"/>
Andere veiligheidsvoorzieningen	<input type="checkbox"/>
<u>Gebruikte sleutels:</u>	<input type="checkbox"/>
<u>Handleiding afgegeven:</u>	<input type="checkbox"/>

Handtekening dealer | Installateur | |
 Handtekening klant | |

Datum | / / |
 Datum | / / |

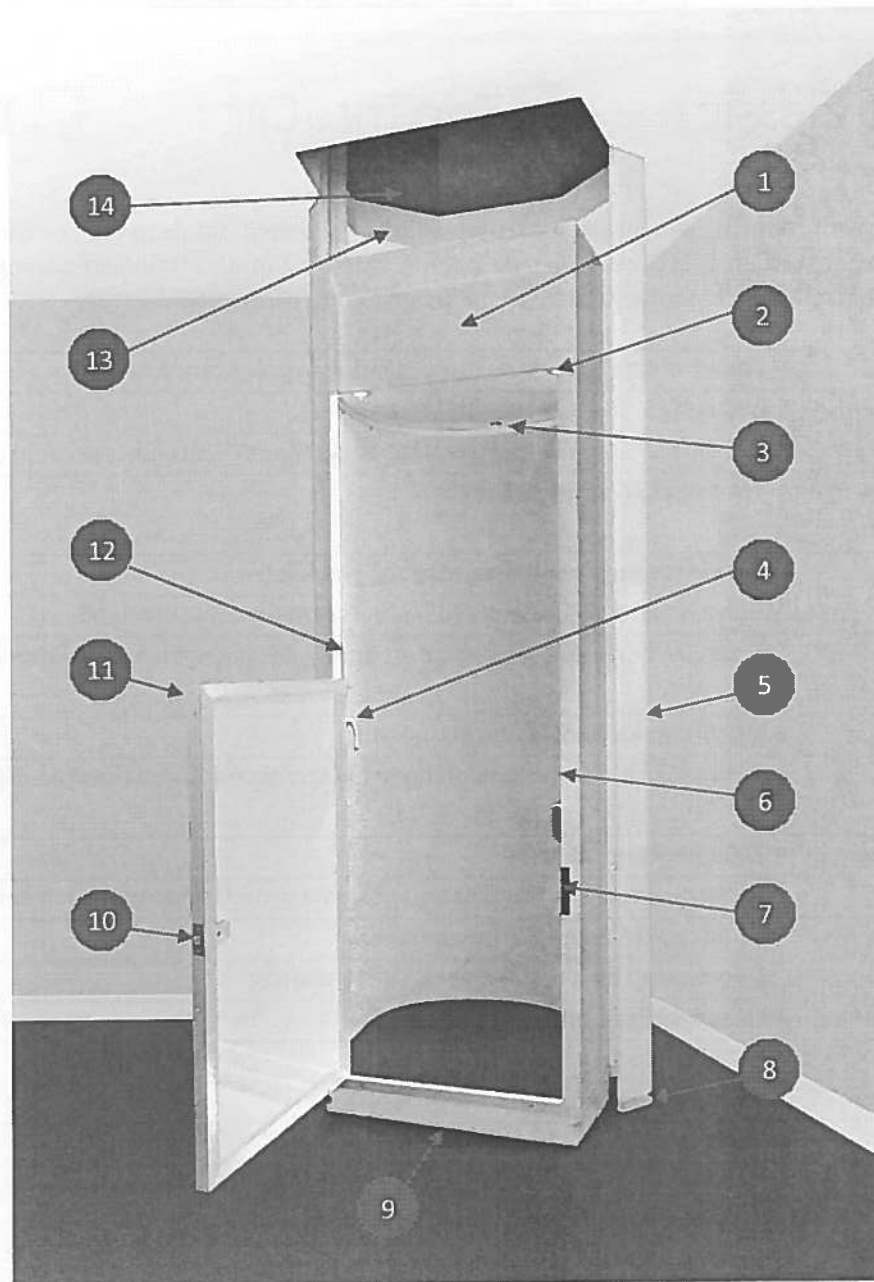HOOFDSTUK 4 BESCHRIJVING



Nr.	Beschrijving	Nr.	Beschrijving
1.	Beschermingspaneel elektra en kabeleenheid	8.	Vloerplaten
2.	Led-lichten	9.	Beschermingsschot
3.	Hoofdschakelaar	10.	Deurklink
4.	Bedieningspaneel kooi (C.O.P.)	11.	Deur (halve hoogte getoond)
5.	Geleiderails	12.	Positie leuning (leuning niet getoond)
6.	Stoelpositie (stoel niet getoond)	13.	Schachtruimte
7.	Slot elektrische deur	14.	Schachtdeksel


HOOFDSTUK 5 TECHNISCHE SPECIFICATIES **Trio Classic** **Trio ThruCar** **Trio Vista**

De Stiltz Trio is geclassificeerd als een niet-automatische lift. Dit betekent dat de gebruiker de lift te allen tijde moet bedienen. De lift moet worden geactiveerd met de interne besturing of de afstandsbediening om hem tussen elke verdieping te verplaatsen. De lift stopt automatisch op de bestemde verdieping.

Type aandrijving:	Touwtrommel, geremde motoraandrijving met tandwiel
Maximum snelheid:	150 mm (5 ¹⁵ / ₁₆ ") / seconde
Maximale belasting:	220 kg 35 st 485 lb (3 staande personen of 1 zittende persoon)
Maximaal af te leggen afstand:	Tot 4 m (157 ¹ / ₂ ") 2 niveaus
Configuratie:	Enkele toegang Dubbele toegang (via kooi)
Deurspecificatie:	Halve hoogte 1100 mm (43 ⁵ / ₁₆ ") – rechts- of linksdraaiend
Entreebeveiliging:	Optische beveiliging volledige hoogte / bewegingssensor (optioneel volledige hoogte deur)
Bediening:	Ingedrukt houden van de knoppen
Oproepstations verdiepingen:	2x draadloze afstandsbedieningen (3x standaard AAA batterijen elk)
Stroomvoorziening:	240V eenfase 5 amp
Accu-back-up:	Lift kan worden verlaagd naar de begane grond in het geval van een stroomstoring
Extra functies:	Noodverlichting en alarm inbegrepen
	Directe stop bij het loslaten van de bediening
	Lastgevoelige bovenplaat boven lift
	Obstakelsensor onder aan de liftkooi
Soort verlichting:	4x 3w led inbouwspots
Installatie:	Normale installatie duurt twee dagen
Constructie:	Niet vereist Lift is volledig zelf-ondersteunend via de eigen geleiderails door de opening tussen de onderste en bovenste verdiepingen, per specificatie
Kabelbehuizing:	Niet vereist Lift is volledig zelf-ondersteunend
Naleving:	Europese machinerichtlijn 2006/42/EC & Australische norm 1735.15
Beschikbare opties:	Stoel, telefoon, externe monitoring, arMLEuning

HOOFDSTUK 6 AFMETINGEN

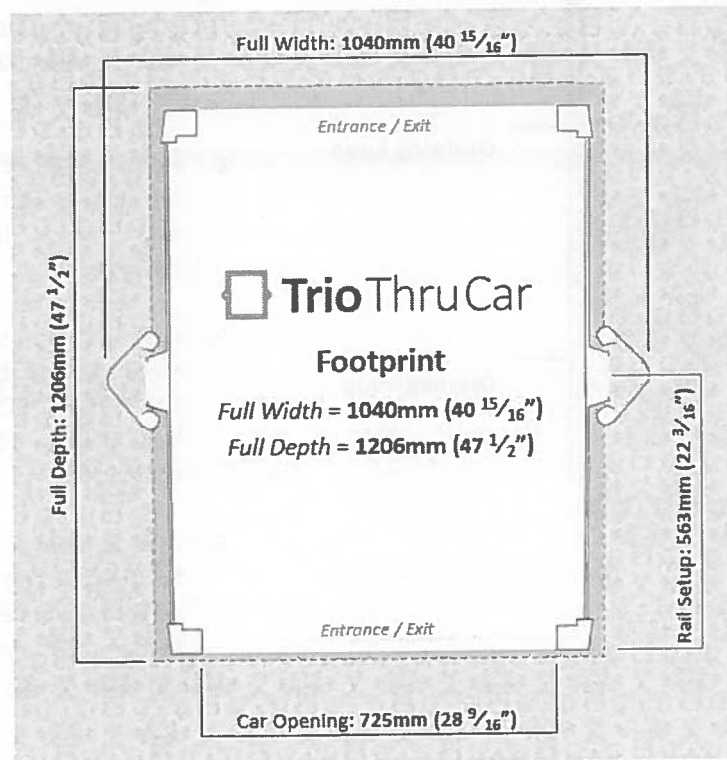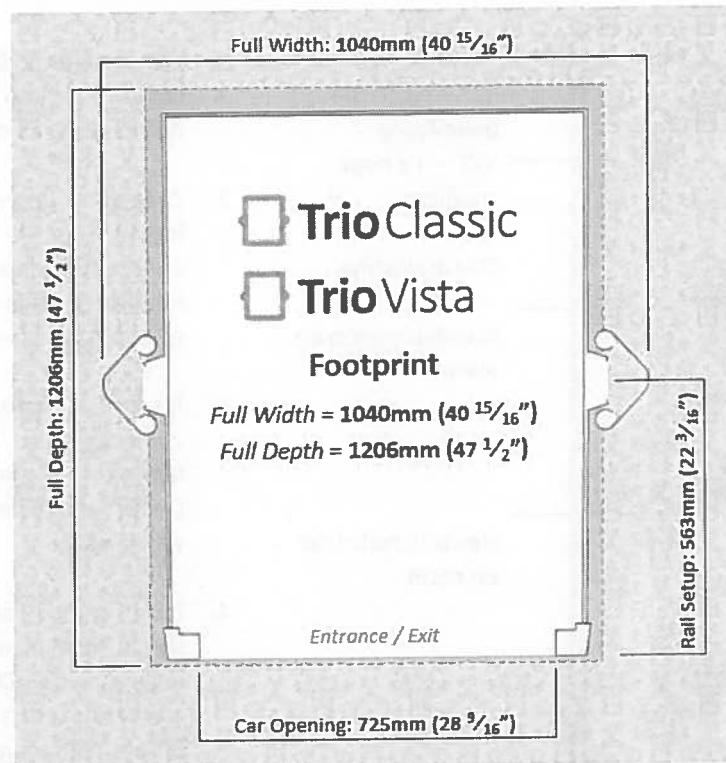


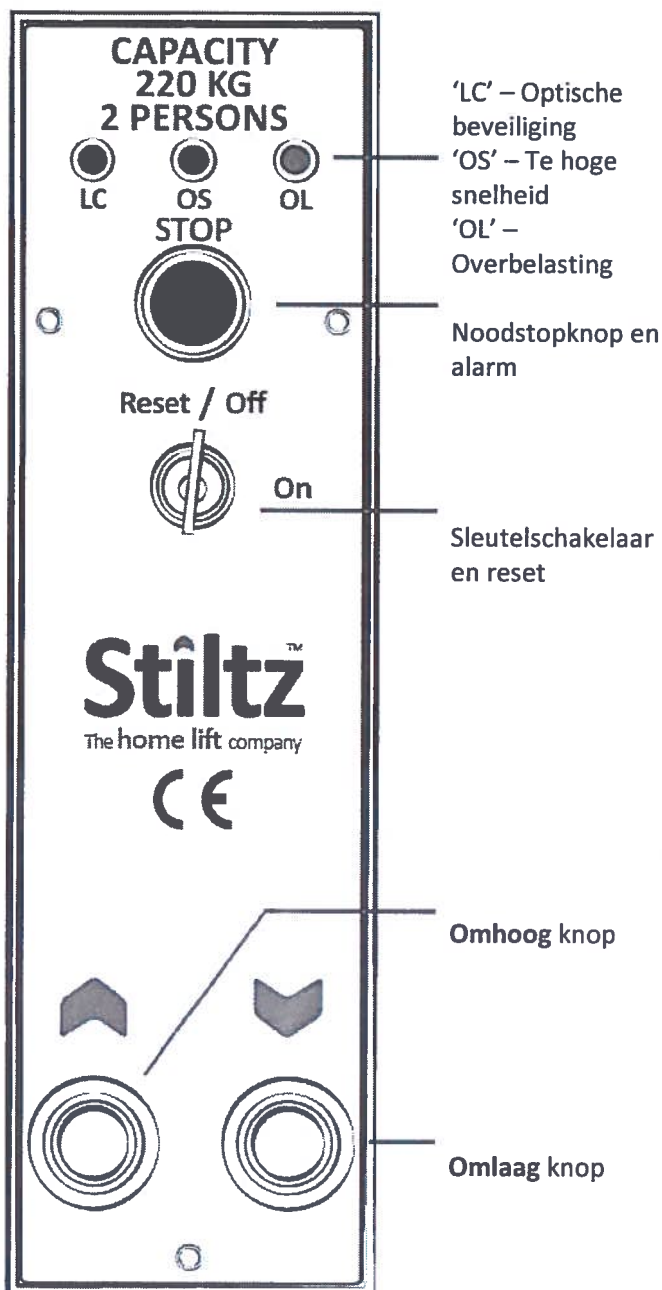HOOFDSTUK 7 BEDIENING**7.1. Bediening van de COP-besturing**

1. Wanneer u de lift binnengaat, gaan de lichten branden. Sta (of zit) in de lift in de richting van de opening.
2. Zorg dat u de veiligheidsfotocel bij de ingang van de lift niet belemmert, anders verplaatst de lift zich niet. Als u het lichtgordijn onderbreekt, zal het rode obstakellampje knipperen.
3. Als de last groter is dan gespecificeerd voor de Stiltz Trio (220 kg) zal het lampje voor overbelasting knipperen. De lift zal niet verplaatsen tot de last is verlaagd.
4. Zorg ervoor dat de sleutel in de sleutelschakelaar zit en is ingeschakeld. De sleutel staat in de werkende positie wanneer deze niet uit het contact gehaald kan worden.
5. Zorg dat de passagiers of goederen die met u verplaatst worden, volledig in de liftkooi passen.
6. Houd de juiste knop ingedrukt voor het naar boven of beneden gaan. Als de knop is ingedrukt zal de lift bewegen.
7. Houd de knop ingedrukt totdat de lift stopt op zijn bestemming. LAAT DE KNOP NIET LOS VOORDAT DE LIFT VOLLEDIG TOT STILSTAND IS GEKOMEN.
8. Als u een onveilige situatie ziet, laat de knop dan los en wacht totdat het weer veilig is om verder te gaan of keer terug naar de verdieping waar u vandaan kwam.

7.2. Bediening van het verdiepingstation

Waar meer dan één persoon de lift gebruiken, zijn er momenten waarop de lift op een andere verdieping is dan de persoon die hem wil gebruiken. In dit geval kan de gebruiker de oproepknop gebruiken om de lift naar de gewenste verdieping te halen.

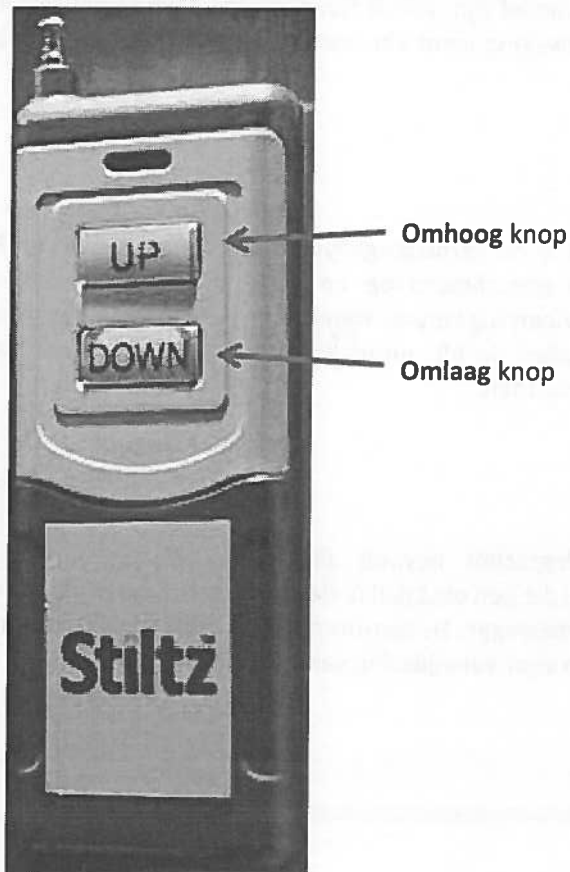

1. Controleer voor zover mogelijk niemand anders in de lift zit die hem wil gebruiken. Druk op de oproepknop op de afstandsbediening en houd hem ingedrukt tot de lift tot stilstand is gekomen. N.B. U kunt de verplaatsing van de lift op elk gewenst moment stopzetten door het loslaten van de knop.
2. Indien de lift een obstakel tegenkomt bij het naar boven of beneden gaan, zal de lift stoppen. Bij het omkeren van de richting verplaatst de lift zich terug naar het startpunt. Ga naar de andere verdieping en verwijder het obstakel voor het weer oproepen of wegsturen van de lift. N.B. De lift zal niet bewegen als de deur open is; hij zal stoppen met bewegen in neerwaartse richting als de sensor in het beschermingsschot een onderliggend object detecteert; en hij zal stoppen in opwaartse richting als hij de vloerplug bereikt en de vloerplugsensor detecteert een object.
3. Wanneer de kooi de verdieping bereikt, zal de deur automatisch ontgrendelen. U moet lichte druk uitoefenen op de deur in de openingsrichting om het vergrendelingsmechanisme los te maken.

HOOFDSTUK 8 VEILIGHEIDSVORZIENINGEN

De veiligheidsvoorzieningen zijn van invloed op de werking van elke Stiltz Trio, daarom is het belangrijk dat u deze allemaal kent. Al deze functies zijn bedoeld om u jarenlang de veiligste en meest comfortabele manier van verplaatsen met uw lift te geven.

Alle veiligheidsvoorzieningen van de Stiltz Trio moeten actief zijn, wil lift functioneren. Elke veiligheidsvoorziening is 'storingsveilig' en voorkomen dat de lift in geval in beweging komt van een probleem met een onderdeel van het veiligheidssysteem.

8.1. Beschermingsschot en vloerplugsensoren



De vloerplug zit in de verdiepingsopening op de bovenste verdieping, met eindschakelaars gemonteerd op de bovenkant van de liftkooi die een obstakel op de vloerplug kunnen detecteren tijdens verplaatsing naar boven. De sensoren zullen de lift automatisch stilzetten waardoor het obstakel verwijderd kan worden.

Het beschermingsschot bevindt zich onder de Stiltz Trio kooi, met eindschakelaars die een obstakel onder de liftkooi kunnen detecteren tijdens het neerwaarts bewegen. De sensoren zullen de lift automatisch stilzetten ter bescherming en voor verwijdering van het obstakel.

8.2. Deurslot en deur-open- sensor

Het licht in de liftkooi gaat aan wanneer u de lift ingaat en de lichtstraal van de optische beveiliging onderbreekt.

De lichtstraal van de optische beveiliging boven de toegang van de lift zet de lift stil als een obstakel de optische beveiliging blokkeert. Om de gebruiker te waarschuwen dat de optische beveiliging wordt geblokkeerd, zal een rood 'LC' waarschuwingslicht op het bedieningspaneel in de kooi knipperen.

Het veiligheidsslot zorgt dat de deur van de liftkooi vergrendeld blijft tijdens het verplaatsen en de sensoren bepalen wanneer de liftdeur wordt gesloten voor in beweging te komen. Voor noodgevallen wordt een sleutel geleverd waarmee de deur van buitenaf kan worden ontgrendeld en losgelaten als de lift zich tussen twee verdiepingen bevindt.



8.3. Extra veiligheidssensoren

Uit-balans-sensoren zullen de gebruiker in de Stiltz Trio melden wanneer er een probleem is met een van de kabels die de lift tussen de verdiepingen beweegt.

Overbelastingssensoren zullen bepalen of de lift overbelast is voor de lift beweegt. Om de gebruiker te waarschuwen dat de lift overbelast is, zal een rood 'OL' waarschuwingslicht op het bedieningspaneel van de kooi knipperen.

Kabelsensoren geven aan of de lift op enige wijze is veranderd. Deze zorgen dat de lift altijd veilig voor gebruik is.

Er zijn noodschakelaars voor het geval de normale schakelaars niet werken. Deze bevinden zich aan de boven- en onderkant van de liftkooi. Zodra deze noodschakelaars werken, wordt de lift stilgezet totdat het incident is onderzocht door een Stiltz ingenieur en het probleem is verholpen.

8.4. Noodfuncties



De Stiltz Trio heeft een noodstopknop. Door op de rode noodstopknop te drukken tijdens het verplaatsen, zal de liftkooi direct stoppen en het alarm activeren, daarom mag dit alleen worden gebruikt tijdens extreme gebeurtenissen zoals het niet stoppen van de lift wanneer de besturingsknop wordt losgelaten. Dit noodstelsel moet worden gereset wanneer de oorzaak van het incident is verholpen.

De sleutelschakelaar voorkomt dat de lift wordt bediend zodra deze is 'uitgeschakeld'. Als de lift stopt door een sensor of een begrenzer, d.w.z. een kabelsensor of noodstopknop, kan de sleutelschakelaar worden gebruikt voor het resetten van de lift hem in de 'off' stand te zetten en dan weer in de 'on' stand.

8.5. Noodrem

De noodrem zet het platform stil in het onwaarschijnlijke geval van een storing van de liftkabel. Wanneer de lift in werking is loopt de grijperstang door de veiligheidsgrijpers, dus in het geval van een storing zullen de veiligheidsgrijpers voorkomen dat de lift in beweging komt, neer- of opwaarts.

8.6. Systeem accuverlaging

Voor het geval van een stroomstoring terwijl de lift in werking is, is de lift uitgerust met een noodstroomvoorziening en noodverlichting die automatisch aangaat. De lift kan naar de onderste verdieping worden verplaatst op noodstroom met behulp van de normale liftbesturing. De opwaartse besturing is dan uitgeschakeld. Alle veiligheidsvoorzieningen blijven volledig operationeel op noodstroom.

HOOFDSTUK 9 PROBLEMEN OPLOSSEN

De meest voorkomende problemen hebben te maken met de veiligheidsvoorzieningen ingebouwd in de Stiltz Trio. Deze functies moeten goed werken om het veilig gebruik en het comfort van de liftgebruikers te waarborgen. Hieronder ziet u een gids voor het oplossen van problemen met het Stiltz assortiment.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
1. De lift werkt niet.	1.1. De meest voorkomende oorzaak is een obstakel van de optische beveiliging die de toegang van de liftkooi bewaakt. Dit kan gemakkelijk worden veroorzaakt door een handtas of arm. Het licht (LC) van de optische beveiliging knippert.	Verwijder het obstakel en let erop dat een obstakel niet regelmatig de optische beveiliging blokkeert. Om dit te voorkomen, moet u dichterbij de achterwand van de lift staan.
	1.2. De sleutelschakelaar van het bedieningspaneel van de kooi (c.o.p.) staat op 'off'.	Draai de sleutel naar 'on'. De 'on' stand is wanneer de sleutel in de horizontale positie staat.
	1.3. De c.o.p. noodstopknop is ingedrukt.	De stopknop is een veiligheidsstopknop die rechts omgedraaid moet worden na het indrukken. Zorg dat de knop wordt ingedrukt, draai deze dan rechtsom tot de knop 'naar buiten' springt. Zet de sleutelschakelaar op 'off' en dan terug naar 'on' voor het resetten van de lift.
	1.4. De netstroom van het huis naar de lift is uitgeschakeld. Dit is gemakkelijk te herkennen omdat het rode controlelampje van de hoofdschakelaar, in het plafond aan de achterzijde van de lift, is uitgeschakeld,	Noodaccu wordt geactiveerd onmiddellijk na de stroomstoring. De lift gaat vanaf de hoogste verdieping naar de laagste verdieping als de stroom uitvalt. Als de lift op de laagste verdieping is, zal hij niet omhoog gaan tot de stroom is hersteld. Als de stroom is ingeschakeld in de rest van het huis, moet u het controlelampje in het plafond van de lift controleren. Als deze is uitgeschakeld, moet u wachten tot de stroomvoorziening is hersteld.

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
	1.5. Iemand heeft geprobeerd om de liftkooi handmatig omhoog te heffen.	Neem contact op met uw erkende Stiltz dealer die uw Stiltz Trio heeft geïnstalleerd. Het hijsmechanisme kan zijn verplaatst en moet misschien worden gereset. Zij zullen u benaderen en vragen om enige toelichting en zullen de beste oplossing voorstellen.
	1.6. De lift is voorbij de laagste of hoogste stoppunten gegaan.	De deur gaat open en u kunt de lift verlaten. Neem contact op met uw erkende Stiltz dealer voor onderhoud.
2. Zowel de optische beveiliging (LC) als de overbelastingslichten (OL) op het bedieningspaneel van de kooi (c.o.p.) flikkeren en knipperen afwisselend.	2.1. De sensor voor te hoge snelheid werkte niet.	Neem contact op met uw erkende Stiltz dealer voor een onderhoudsafspraak om het probleem te herstellen.
3. De liftkooi werkt niet op de afstandsbediening.	3.1. De batterijen van de afstandsbediening moeten vervangen worden.	Vervang de batterijen. Alle afstandsbedieningen van de lift gebruiken 3 x AAA batterijen.
	3.2. De ontvanger kan misschien niet het signaal van de afstandsbediening ontvangen.	Ga naar een bereik van minder dan 3 m (10') van de lift. Dit is het optimale bereik van de afstandsbedieningen.
4. De liftkooi gaat niet naar beneden maar alleen omhoog.	4.1. Er is een obstakel onder de liftkooi.	Verwijder het obstakel voordat u de lift gaat gebruiken.
5. De liftkooi gaat niet omhoog maar gaat alleen naar beneden.	5.1. Er is een obstakel in de schacht	Verwijder het obstakel voordat u de lift gaat gebruiken.
	5.2. De netstroom is uitgeschakeld en de de liftkooi werkt op de noodaccu.	Wacht totdat de netstroom is hersteld.
	5.3. De veiligheidskap kan worden meegenomen door de geleiders enz. als deze wordt opgetild.	Observeer veilig vanaf de bovenverdieping of de kap is opgetild in plaats van naar de volgende verdieping te gaan.
6. De liftkooi beweegt zomaar omhoog of omlaag.	6.1. Afstandsbedieningen van verdiepingen worden vaak in zakken van mensen bewaard, en controleer	Houd de afstandsbedieningen van de verdiepingen op elke verdieping en druk ze niet per ongeluk in. Neem contact op met

Probleem	Mogelijke oorzaken	Oplossing
	daarvoor uw zakken als de knop wordt ingedrukt.	uw erkende Stiltz dealer voor onderhoud.
7. De inbouwspots in het plafond van de liftkooi zijn zwak en de afstandsbedieningen werken met tussenpozen of helemaal niet.	7.1. De liftaccu is bijna leeg.	Neem contact op met uw erkende Stiltz dealer voor onderhoud.
8. De deur gaat niet open.	8.1. De lift is niet op de verdieping.	Gebruik de c.o.p. knoppen of de afstandsbedieningen om de lift naar de juiste verdieping te halen. Zorg dat de besturingsknop wordt ingedrukt totdat de lift volledig tot stilstand komt.
	8.2. De deur raakt de drempel van de bovenverdieping.	Haal de lift naar beneden met behulp van de c.o.p. knoppen of afstandsbedieningen. Zorg dat de knop wordt ingedrukt tot de lift volledig tot stilstand komt.
9. Er klinkt een zoemer.	9.1. De stopknop wordt ingedrukt.	Draai de stopknop rechtsom totdat deze in uw richting naar 'buiten springt'. Reset de lift door de sleutelschakelaar om te draaien naar 'off' en dan weer terug naar 'on'.
	9.2. Het back-up accusysteem heeft een storing.	Neem contact op met uw erkende Stiltz dealer voor onderhoud.

HOOFDSTUK 10 GARANTIE

De Stiltz Trio thuislift heeft een garantie voor de eindgebruiker tegen slecht vakmanschap of materialen gedurende een periode van **12 maanden** vanaf ingebruikname door een erkende autoriteit of installatie door een erkende Stiltz dealer.

Stiltz of de erkende Stiltz dealer zal het volgende leveren:

- Alle apparatuur behorend bij de Stiltz Trio, inclusief:
 - liftschachtgeleiders,
 - liftkooi,
 - kabelinstallatie (elektrische besturing en mechanische aandrijfapparatuur), en
 - alle veiligheidsapparatuur d.w.z. veiligheidsschakelaars, beschermingsschotten aan boven- en onderkant.
- montagetekeningen.
- Noodaccu-back-up voor verlichting en verlagen van de Stiltz Trio in het geval van een stroomstoring.

Klant of aannemer levert:

- Vloeropening, volgens de Stiltz Trio specificaties.
- Stroom, volgens de positie bepaald in de specificatie.
- Duidelijke toegang tijdens installatie.
- Voorzieningen voor Stiltz- of dealerpersoneel tijdens de installatie d.w.z. wastafel en toilet.
- Al het schilderwerk en afwerking van de omringende constructiegebieden.

De garantie dekt geen abusievelijke, opzettelijke en cosmetische schade of schade veroorzaakt door het in gebreke blijven van de eindgebruiker zich aan de veiligheids- of gebruikersrichtlijnen te houden of door redelijke slijtage of het niet opvolgen van het routinematige onderhoudsschema.

Alle installatie- en onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een erkende Stiltz dealer of Stiltz onderhoudsmonteur. Een poging om het product te repareren of te verwijderen uit zijn installatielocatie door derden zal de garantie teniet doen.

Door het verwijderen of wijzigen van onderdelen of panelen op enige wijze waardoor het gebruik van de Stiltz Trio wordt aangepast buiten het beoogde of het eigenlijke doel, komt de garantie te vervallen.


Accustoring valt niet onder deze garantie.

Alle kosten van reparaties en latere werkzaamheden als gevolg van acties die de garantie laten vervallen, en in verband met de terugkeer van de lift naar zijn volledige functionele staat, komen voor kosten van de eigenaar en worden tegen het geldende tarief gefactureerd.

Voor meer informatie over deze beperkte garantie kunt u schriftelijk contact opnemen met Stiltz.

VOOR DE ADMINISTRATIE VAN DE EIGENAAR	
Naam van de klant:
Installatie-adres:
Naam dealer/installateur
Installatiedatum: / /
Serie- of opdrachtnummer:

Stiltz team of erkende Stiltz dealer

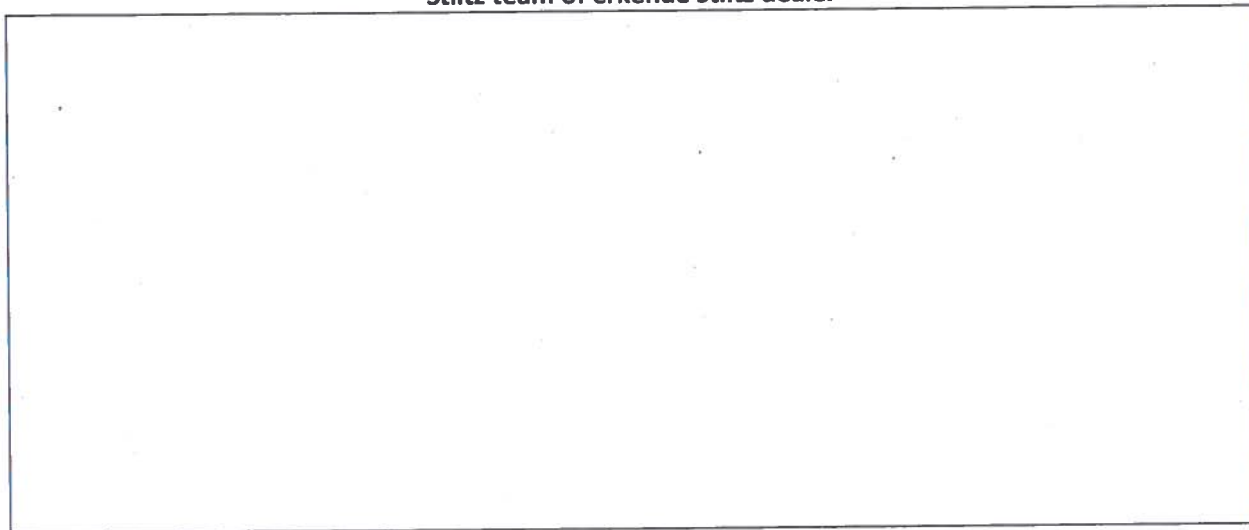

StiltzTM
The **home lift** company

**STILTZ LIMITED HOOFDKANTOOR
(VERENIGD KONINKRIJK)**

Unit 13 Anglo Trade Park,
Fishponds Road, Wokingham,
Berkshire, RG41 2AN

Tel: 0044/808 278 1634

info@stiltz.co.uk
www.stiltz.co.uk

**STILTZ INC.
(VERENIGDE STATEN)**

964 Postal Road,
Allentown, PA 18109

Tel: 001/(610) 443-2282

info@stiltzlifts.com
www.stiltzlifts.com